

Prelievo dei capelli per il test **BCC**®.

Il prelievo dei capelli deve essere eseguito su capelli sporchi da almeno 24-48 ore. I capelli vanno prelevati con il bulbo e lo stelo, è essenziale per il corretto esito del test.

Nei soggetti con capelli cortissimi, usare pinzette apposite e/o pinzette tipo per sopracciglia.

I punti di prelievo sono indicati come punti POP (vedi foto) chiamati punti operativi preferenziali e sono:

- Fronto-parietale dx e sx (da non utilizzare se esistono situazioni tipo alopecia sia maschile che femminile)
- Occipitale e/o occipitale inferiore (nel caso di alopecia estesa)
- Retro - auricolare sx e dx.

Possono bastare 10-15 capelli per punto di prelievo.

Nei casi in cui non è possibile il prelievo nei due punti fronto-parietali, aumentare il numero in altre zone limitrofe.

I capelli prelevati devono raggiungere un numero non inferiore a 60, tutto questo per una valutazione corretta e attendibile.

Per le donne, specificare se all'atto del prelievo, è in corso la fase mestruale.

I capelli, così prelevati, vanno messi in apposito contenitore e/o carta stagnola e accompagnati dalla scheda dati compilata in tutte le sue parti e, se possibile, con valutazioni personali e/o anche del medico curante.

Il tutto va poi spedito allo **Studio Tricologico e Fitocosmetico**®.

